

## Gebrauchsanweisung



AquaSplint *thermo* mit einer Pinzette **2–3 Minuten in 80 °C heißes Wasser** eintauchen, bis der Kunststoff transparent wird.

Danach **10 Sekunden in kaltem Wasser** abkühlen lassen.



AquaSplint *thermo* im Unterkiefer einsetzen und **ca. 5 Minuten** abkühlen lassen.




Zur Beschleunigung der Abkühlung mit kaltem Wasser nachspülen. **Nach Verfestigung herausnehmen.**



Okklusionsstörende **Überschüsse entfernen.** Bei unerwünschtem Ergebnis kann der gesamte Vorgang wiederholt werden.

## Instruction for use

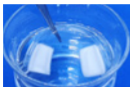

Dip AquaSplint *thermo* with tweezers in hot water for **2–3 minutes at 80 °C** until the plastic becomes transparent.

Let cool for **10 seconds** in cold water.



Insert AquaSplint *thermo* in the lower jaw and let **cool down for about 5 minutes**.



Rinse with cold water to accelerate cooling.  
**Remove after solidification.**



**Remove any excess** that may disturb the occlusion. If the result is undesirable, the whole process can be repeated.