

ISODENT

Finnish innovative oral care

Product Catalogue



IsoDent Product Family

Revolucionārs mutes skalošanas līdzeklis pret gingivītu. Unikālā IsoDent Paro produktu līnija ir efektīvs līdzeklis audu reģenerācijai periodontīta un periimplantīta gadījumā. Tā tika izstrādāta kopā ar amerikāņu pētnieku grupu. Produkts stimulē organisma aizsargmehānismus, lai pārvarētu mutes dobuma iekaisumu. Turklāt tas efektīvi novērš kariesu. Unikāls ksilīta un eritrīta apvienojums nodrošina drošu papildu aizsardzību pret kariesu.



IsoDent Paro Mild mutes skalojamais līdzeklis

250 ml GTIN 6430043961190 *CE (MDR 2017/745)*

100 ml GTIN 6430043961152 *CE (MDR 2017/745)*

Paredzēts galvenokārt mukozīta profilaksei un regulārai balstterapijai pēc aktīvās fāzes. Turklāt preparāts satur CI-dekstranu, kas ievērojami samazina zobu bojāšanos.

Rūpīgi izskalojiet reizi dienā 60 sekundes pēc zobu tīrīšanas vakarā vai reizi dienā pēc zobārsta norādījumiem. Neizskalojiet.

Ingredients: Water, propylene glycol, xylitol, erythritol, ethanol, aroma, CI-dextran, sodium saccharin, lipoxin A4-ME, acetic acid.

250ml
Cena ar PVN: 16,24 €

100ml
Cena ar PVN 7,99€



IsoDent Paro mutes skalojamais līdzeklis

250 ml GTIN 6430043960186 *CE (MDR 2017/745)*

100 ml GTIN 6430043960179 *CE (MDR 2017/745)*

Paredzēts galvenokārt smaganu un gļotādu asiņošanas ārstēšanai.

Rūpīgi skalojiet muti reizi dienā 60 sekundes pēc zobu tīrīšanas vakarā vai reizi dienā pēc jūsu zobārsta norādījuma.

Neskalot. Vislabāko ārstēšanas rezultātu panāk, lietojot nepārtraukti 3 mēnešu laikā.

Ingredients: Water, propylene glycol, xylitol, erythritol, ethanol, aroma, sodium saccharin, lipoxin A4-ME, acetic acid.

250ml
Cena ar PVN: 64,93€

100ml
Cena ar PVN: 30,47€



IsoDent Paro Strong mutes skalojamais līdzeklis

250 ml GTIN 6430043961176 *CE (MDR 2017/745)*

100 ml GTIN 6430043961138 *CE (MDR 2017/745)*

Paredzēts zobu balstaudu progresējošu problēmu ārstēšanai, kad zobi ir kustīgi un smaganu malas pastāvīgi iekaisušas.

Rūpīgi skalojiet muti reizi dienā 60 sekundes pēc zobu tīrīšanas vakarā vai reizi dienā pēc jūsu zobārsta norādījuma.

Neskalot. Vislabāko ārstēšanas rezultātu panāk, lietojot nepārtraukti 3 mēnešu laikā.

Ingredients: Water, propylene glycol, xylitol, erythritol, ethanol, aroma, sodium saccharin, lipoxin A4-ME, acetic acid.

250ml
Cena ar PVN: 120,78€

100ml
Cena ar PVN: 44,65€



IsoDent Super Junior mutes skalojamais līdzeklis

250 ml 6430043960124 *CE (MDR 2017/745)*

100 ml 6430043960117 *CE (MDR 2017/745)*

Košļājamās gumijas aromāta mutes skalojamais līdzeklis jaunākajiem ģimenes locekļiem. Tā satur 0,05% nātrija fluorīda NaF (0,5 mg/ml, 230ppmF) un ir paredzēts bērniem vecākiem par 6 gadiem. Regulāri lietojot, fluorīds stiprina zobus, un unikālā ksilitola, eritrita un CI dekstrāna kombinācija droši novērš zobu bojāšanos. Mutes skalojamais līdzeklis ir efektīvs papildinājums zobu tīrīšanai ar zobu pastu. Uzpildiniet apmēram 1/2 vāciņa mutes skalojama līdzekļa, 60 sekundes skalojiet muti un pēc tam izspļaujiet. Nenorijiet. Lietojiet 1-2 reizes dienā. Nav paredzēts maziem bērniem.

Ingredients: Aqua, xylitol, erythritol, flavouring, sodium benzoate, sodium fluoride, citric acid.

*contains 0.05% sodium fluoride

250ml

Cena ar PVN: 8,13€

100ml

Cena ar PVN: 5,14€



IsoDent Meadow Mitrinošs mutes skalojamais līdzeklis

250 ml GTIN 6430043960490 *CE (MDR 2017/745)*

100 ml GTIN 6430043960131 *CE (MDR 2017/745)*

Pilnīgi jaunā IsoDent Niitty mitrinošā mutes skalojamais līdzeklis ir balstīts uz senu, laika gaitā pārbaudītu austrumu recepti, kurai esam pievienojuši jaunas aktīvās sastāvdaļas no mūsdienu rietumu zobārstniecības, piemēram, fluorīdu, ksilitu un eritritolu, kas palīdz novērst zobu bojāšanos. Dabīgais betaīns efektīvi cīnās pret mutes sausumu, palīdz novērst mutes dobuma sēnišu augšanu, zobu virsmas eroziju un novērš sliktu elpu. Mutes skalojamais līdzeklis nodrošina ilgstošu mutes dobuma atsvaidzināšanu bez alkohola un bez pārmērīga "trieciena", izšļakstoties, tāpēc tā lietošana ir ļoti patīkama. Uzpildiniet apmēram 1/2 vāciņa šķiduma, apmēram 1 minūti rūpīgi izskalojiet muti un izspļaujiet.

Sakratīt pirms lietošanas

Tagad pieejams arī mazākā 100 ml pudelītē.

Ingredients: Aqua, xylitol, erythritol, betaine, sodium benzoate, flavorings, chamomile extract, rose extract, sodium fluoride, citric acid, food coloring, contains 0.05% sodium fluoride .

250ml

Cena ar PVN: 9,56€

100ml

Cena ar PVN: 6,05€



IsoDent Fluor+ kopjošais mutes skalojamais līdzeklis

250 ml 6430043960278 *CE (MDR 2017/745)*

100 ml 6430043960353 *CE (MDR 2017/745)*

IsoDent Fluor+ kopjošais mutes skalojamais līdzeklis satur 0,15 % fluorīdu, kas efektīvi aizsargā zobus no kariesa. Unikāla ksilita un eritrita kombinācija vēl vairāk samazina kaitīgo demineralizāciju. Smiltsērķšķu ekstrakts stiprina mutes gļotādu un paātrina brūču dzīšanu. Tas arī palīdz uzturēt mutes gļotādu komfortabli mitru. Kumelītei piemīt nomierinoša iedarbība, un brūklenes ne tikai efektīvi aizsargā mutes gļotādu, bet arī darbojas kā dabīgs konservants. PH līmenis 6. Produkts dabiski atsvaidzina elpu, atstājot maigu un maigu garšu mutē. Lietojot divas reizes dienā, tas nodrošina 24 stundu aizsardzību pret kariesu. Tagad pieejams arī mazākā 100 ml pudelītē.

Sakratīt pirms lietošanas.

Ingredients: Aqua, xylitol, erythritol, lingonberry extract, sea buckthorn extract, chamomile extract, marigold extract, sodium fluoride, flavorings.

250ml

Cena ar PVN: 9,20€

100ml

Cena ar PVN: 6,53€



IsoDent Pirmsoperācijas antibakteriālais mutes skalojamais līdzeklis

250 ml GTIN 6430043969998 *CE (MDR 2017/745)*

530 ml GTIN 6430043960759 *CE (MDR 2017/745)*

IsoDent Preoperational ir jauns mutes skalošanas līdzeklis, kas būtiski samazina mikroorganismu saturu siekalās (ieskaitot potenciālos nCoV vīrusus, kas izraisa saslimšanu ar COVID-19), tādējādi efektīvi novēršot citu cilvēku inficēšanos caur aerosolu. Satur 1,0% ūdeņraža pārskābes, spēcīgu oksidētāju, kas iznīcina slimību izraisošos mikroorganismus, kā arī brūklenes gļotādu aizsardzībai.

Paņemiet apmēram 1/2 šķiduma vāciņu, rūpīgi izskalojiet muti apmēram 1 minūtes laikā un izspļaujiet.

Sakratīt pirms lietošanas.

Ingredients: Aqua, 1% hydrogen peroxide, xylitol, lingonberry extract and flavoring.

250ml
Cena ar PVN: 11,98€

530ml
Cena ar PVN: 16,82€



IsoDent aizsargājošs mutes skalojamais līdzeklis

250 ml GTIN 6430043960285 *CE (MDR 2017/745)*

100 ml GTIN 6430043969929 *CE (MDR 2017/745)*

IsoDent Protective Mouthwash ievērojami samazina mikroorganismu daudzumu siekalās (tostarp potenciālos Covid-19 vīrusus), efektīvi novēršot vīrusu infekciju. Tas arī efektīvi novērš virsmas piesārņošanu, kas rodas, pilienu ceļā inficējoties. Tā satur 0,5 % ūdeņraža peroksīda, spēcīgas oksidējošas sastāvdaļas, kas iznīcina patogēnus. Mutes skalojamais līdzeklis satur arī brūkleņu arbutīnu un ksilītu, kas aizsargā gļotādas.

Reaktīvais šķīdums balina zobus un likvidē jebkākus traipus. Brīdinājums! Papildus šim produktam vienmēr lietojiet arī citus ieteiktos līdzekļus. Uzpiliniet apmēram 1/2 vāciņa šķiduma, apmēram 1 minūti rūpīgi skalo muti un izspļaujiet.

Tagad pieejams arī mazākā 100 ml pudelītē.

Sakratīt pirms lietošanas.

Ingredients: Aqua, 0.5% hydrogen peroxide, xylitol, erythritol, lingonberry extract and flavoring.

250ml
Cena ar PVN: 11,86€

100ml
Cena ar PVN: 8,83€



IsoDent Ortho tīrītājs

250 ml GTIN 6430043960070 *CE (MDR 2017/745) , UKCA*

100 ml GTIN 6430043960025 *CE (MDR 2017/745) , UKCA*

Sagatavojiet tīrīšanas šķīdumu, sajaucot IsoDent Ortho tīrītāja koncentrātu ar ūdeni.

Tīrīšanas šķīdums efektīvi izšķīdina visus uz breketēm un mutes aizsargu uzkrātos netīrumus. Tas arī noņem no breketēm un aizsargiem baktērijas un sēnītes, kas var izraisīt nepatīkamas mutes dobuma infekcijas. IsoDent Ortho ir arī saudzīgs, tas nekad nebojā breketu un citu zobārstniecības ierīču delikātās locītavas vai titāna daļas. Tā daudzpusība padara to arī par izmaksu ziņā ļoti izdevīgu risinājumu. Patiess cenas un vērtības attiecība: 250 ml pudeles pietiek līdz pat 3 mēnešiem ikdienas lietošanai. Tagad pieejams arī mazākā 100 ml pudelītē. IZMANTOT TIKAI NOŅEMAMĀM DAĻĀM

Ingredients: Aqua, phosphoric acid, acetic acid, calcium carbonate, sodium hydroxide, potassium carbonate, mint flavoring, food coloring.

250ml
Cena ar PVN: 8,11€

100ml
Cena ar PVN: 3,75 €



IsoDent zobu protēžu tīrīšanas līdzeklis

250 ml GTIN 6430043960087 *CE (MDR 2017/745) , UKCA*

100 ml GTIN 6430043960018 *CE (MDR 2017/745) , UKCA*

Sagatavojiet tīrīšanas šķīdumu, sajaucot IsoDent protēžu tīrīšanas līdzekļa koncentrātu ar ūdeni. Tīrīšanas šķīdums efektīvi noņem traipus un zobakmeni, kas laika gaitā sakrājas uz protēzēm, un palīdz atbrīvoties no baktērijām un sēnīšu veidojumiem, kas izraisa iekaisumus. Tīrīšanas šķīdums ir aktīvs un pilnībā efektīvs 5 dienas. IsoDent ērtumu papildina svaiga piparmētru garša. IsoDent ir arī ļoti rentabla alternatīva tradicionālajām protēžu tīrīšanas metodēm, pateicoties tā daudzpusīgumam. Patiesa cenas un kvalitātes attiecība: 250 ml pudeles pietiek līdz pat 3 mēnešiem ikdienas lietošanai. Tagad pieejams arī mazākā 100 ml pudelē. IZMANTOT TIKAI NOŅEMAMĀM DAĻĀM

Ingredients: Aqua, phosphoric acid, acetic acid, calcium carbonate, sodium hydroxide, potassium carbonate, mint flavoring, food coloring.

250ml
Cena ar PVN: 8,11€

100ml
Cena ar PVN: 3,75€



IsoDent Zobu protēžu limēšanas krēms

40 g GTIN 6430043960001 *CE (MDR 2017/745)*

Somijas uzņēmuma IsoDent Oy izstrādāts un ražots produkts. Tā pārbaudītais sastāvs notur protēzes vietā visu dienu, vienlaikus veicinot mutes gļotādas labsajūtu. Tā aktīvās iedarbības pamatā ir arktiskie garšaugi. Piemērots ikdienas lietošanai. Nesatur cinku un mākslīgos konservantus, tostarp parabēnu. Arktiskie garšaugi nodrošina spēcīgu antibakteriālu iedarbību, kas, kā pierādīts, iedarbojas pret, piemēram, rauga (candida albicans) un rīkles infekcijām (Streptococcus pyogenes).

Ingredients: Petrolatum, paraffinum, methyl cellulose, polyethyl oxide, arctic herbs extract, peppermint oil.
Cena ar PVN: 7,50€



IsoDent Zobu protēžu līmes pulveris

20 g GTIN 6430043960056 *CE (MDR 2017/745)*

IsoDent zobu protēžu līmes pulveris nodrošina pierādītu antibakteriālu un pretsēnīšu iedarbību, kas cita starpā aktīvi novērš mutes dobuma sēnīšu infekcijas. IsoDent novērš kaitīgo baktēriju vairošanos, vienlaikus kopjot mutes gļotādu - atšķirībā no tradicionālajiem adhezīviem, kas galvenokārt darbojas kā augsne kaitīgo baktēriju savairošanai. Pulveris neizšķīdina konservantus organismā. Adhezīva pulveris veido ciešu un noturīgu saiti starp zobu protēzi un smaganām. Tā sastāvā ir piparmētra, kas palīdz saglabāt svaigu elpu. IsoDent zobu protēžu līmpulveris ir ļoti ekonomisks: pietiek ar nelielu daudzumu, lai zobu protēzes noturētu savā vietā visu dienu, lai ko Jūs darītu.

Ingredients: Sodium alginate, cellulose, arctic herbs extract, flavorings.

Cena ar PVN: 8,47€



IsoDent Zobu balinātājs

GTIN 6430043961343 *CE (MDR 2017/745)*



Inovatīvs balinātājs viegli un ātri balina zobus!

Balinātāja augstas kvalitātes mikrošķiedras struktūra pilnībā noņem traipus un aplikumu bez ķīmiskām vielām.

Nebojā zobu emalju.

IsoDent zobu balinātājs efektīvi un droši noņem traipus. Lieliski piemērots tabakas, tējas un kafijas radīto vietējo traipu noņemšanai. Nevainojami atbalsta zobārstniecības klīnikā veiktās balināšanas procedūras rezultāta uzturēšanu.

Cena ar PVN: 9,20€



IsoDent iemutiņu un zobu protēžu tīrīšanas un uzglabāšanas kārbā

GTIN 6430043960049 *CE (MDR 2017/745)*



Parocīga un viegli lietojama tīrīšanas vanniņa noņemamiem mutes aizsarglīdzekļiem un

protēzēm; no IsoDent mazgāšanas šķidruma un ūdens pagatavojiet apmēram 20 % darba

šķīdumu un iegremdējiet izskaloto aizsargu/protēzi šķīdumā apmēram uz 5-10 minūtēm vai,

ja vēlaties, atstājiet to kastītē uz nakti. Notīriet birstīti zem tekoša ūdens, izmantojot

noņemamo skalošanas paplāti, kas atrodas kastītē. Zobakmens un spēcīgāku traipu

noņemšanai izmantojiet koncentrētu (50 %) šķīdumu..

Cena ar PVN: 3,58€



IsoDent zobu protēžu birste

GTIN 6430043960063 *CE (MDR 2017/745)*



- - Stingrs satvēriens, pateicoties polsterētajam pretslīdes materiālam.
- - Krūmainā birstes daļa efektīvi tīra
- - Šaurā birstīte ar šauru galu notīra šauras vietas
- - Stiprā un izturīgā neilona birste nebojā maigo protēzes virsmu.

Cena ar PVN: 3,75€



IsoDent Breketu un izņemamo zobu protēžu tīrīšanas birste

GTIN 6430043960469 *CE (MDR 2017/745)*



- -Stingrs satvēriens, pateicoties polsterētajam pretslīdes materiālam
- - Krūmainā birstes daļa efektīvi tīra
- - Šaurā birstīte ar šauru galu tīra šauras detaļas
- - Stiprā un izturīgā neilona birste nebojā breketes vai protēzes

Cena ar PVN: 3,75€